

【產品使用說明 | 動物體內溫度監測感應器】

1/ 使用說明

■ 使用說明書：R1.0

■ 內含設備

- 充電器 x 1
- 電池 x 1
- 感應器本體 x 1

■ 開始使用前—充電工作

請先將電池連接充電器，並插入 5V USB 電源，充電時間約需 5~10 分鐘。

- ✓ 充電期間，燈號呈現「紅燈」。
- ✓ 充飽電力後，燈號呈現「綠燈」即完成充電。

2/ 組裝感應器



※ 請將感應器「後端」旋轉開來，依如上圖。接著按下方步驟操作：

步驟 1：

請將已充飽電的電池連接到上圖紅色圈起的連接器上。

步驟 2：

如果您是採購整套產品(包含一個網關，一個感應器)，請直接將電池置入，再將「小鋁片」先放在感應器口，再將蓋子旋緊蓋上即可使用。

步驟 3：

如果您是採購單一感應器，您需自行和網關配對，方能使用。詳情請參閱「RF 網關與動物體內溫度監測感應器」之使用安裝手冊操作。