

【快速安裝手冊：睿橋資訊 9500N-100 體溫魔鏡使用說明書】

➤ 產品說明

COVID-19 病毒肆虐全球，導致全球生活環境、基本健康受到明顯威脅與不安全，進而投入開發防疫產品—9500N-100 體溫魔鏡，可在各式公共空間，實施人體溫度檢查，降低染病機會，同時提升自我防疫，創造健康生活環境。

➤ 產品功能用途

9500N-100 體溫魔鏡，簡言之為可快速測量額溫，精準度高的測溫產品。在一般公司行號，學校等單位，直接設置在門口偵測。當員工、學生進入公司或是校園，透過體溫魔鏡能直接在照鏡子的過程中，立刻測得體溫，無需透過旁人的協助測得溫度，即是自動化完成測溫功能產品，同時降低採用額溫槍的機率，因使用額溫槍需要旁人手持測溫，可能有人體接觸機會，藉此，為預防與確保健康衛生問題之外，亦降低交互接觸感染的機會，因而設計開發此產品。

➤ 產品內容物

* 型號品名：9500N-100 體溫魔鏡，內容包含下列物件：

- 9500N-100 體溫魔鏡主機乙套
- USB 電源線乙條
- USB 電源供應器乙個
- 3M 雙面貼紙兩份

➤ 使用前準備

1. 請撕開體溫魔鏡檢測器 3M 雙面膠貼紙，貼在想要固定的位置；插入 USB 電源線，連上電源供應器，並接上家中或環境的電源即可使用
2. 開機後 OLED 畫面，將會顯示開機畫面約等 5~10 秒，畫面消失後直接進入測溫模式；建議：設備開機後，讓設備熱機 10 分鐘後再正式進行使用。


➤ 溫度及相關設定方式

側邊按鍵設定溫度、攝華氏、警報聲音開關三種不同方式，依按鍵不同的壓下時間做不同設定

1. 警報溫度調整: OLED 顯示數字為 3~5 時，放掉按鍵進入設定。(預設: 37.5)
2. 攝氏/華氏調整: OLED 顯示數字為 6~8 時，放掉按鍵進入設定。(預設: 攝氏)
3. 警報聲音開關調整: OLED 顯示數字為 9~11 時，放掉按鍵進入設定。(預設: Speaker On)

設定:

1. 警報溫度調整: 按下體溫魔鏡檢測器側邊-設定按鍵，當看到 OLED 顯示數字為 3 時，放開按鍵顯示如 37.0，按一下，變成 37.1，再按一下，變成 37.2，以此類推；當系統偵測到 3 秒內，沒再按下按鍵，此時的溫度，即為高溫警報溫度

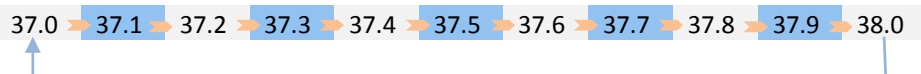

2. 溫度單位調整: 按下體溫魔鏡檢測器側邊-設定按鍵，當看到 OLED 顯示數字為 6 時，放開按鍵，出現°C，再按一下按鍵為°F，再按一下為°C，當系統偵測到 3 秒內，沒再按下按鍵，以最後的單位為主
3. 警報聲音開關調整: 按下體溫魔鏡檢測器側邊-設定按鍵，當看到 OLED 顯示數字為 9 時，放開按鍵，出現 Speaker ON，代表警報聲音開啟;按一下按鍵為 Speaker OFF，再按一下為 Speaker ON; 當系統偵測到 3 秒內，沒再按下按鍵，以最後的設定值為主

產品外觀圖一



產品外觀圖二




產品外觀圖三



➤ 量測方式

1. 額頭距離感測器中心約 30-50 cm，3 秒後可得到量測體溫值(使用示意圖四)
2. 正確量得體溫，會聽到 Bi 一聲提示音
3. 當量測到體溫超過設定值，會聽到 Bi Bi Bi 三聲提示音
<以上在 Speaker On 模式下才有提示音>


使用示意圖四

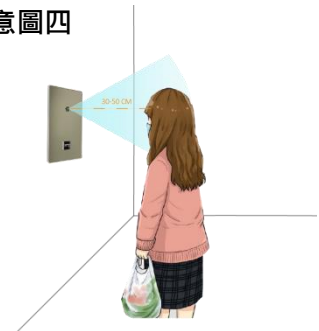

【快速安裝手冊：睿橋資訊 9500N-100 體溫魔鏡使用說明書】

➤ 備註說明- **測量體溫的注意事項提醒!!**

1. 本產品不能在太陽光下面進行測量體溫的工作，如果必須在室外進行體溫檢查，則建議需要搭設一個遮光棚架，遮擋太陽(如下示意圖)。
 - 甲、當太陽光直接照射，頭髮會快速吸收太陽，而拉高體溫。
 - 乙、流汗時，請勿測量體溫。此時人屬於散熱狀態，身體機制會把熱排出人體，因此測試體溫將會偏低。

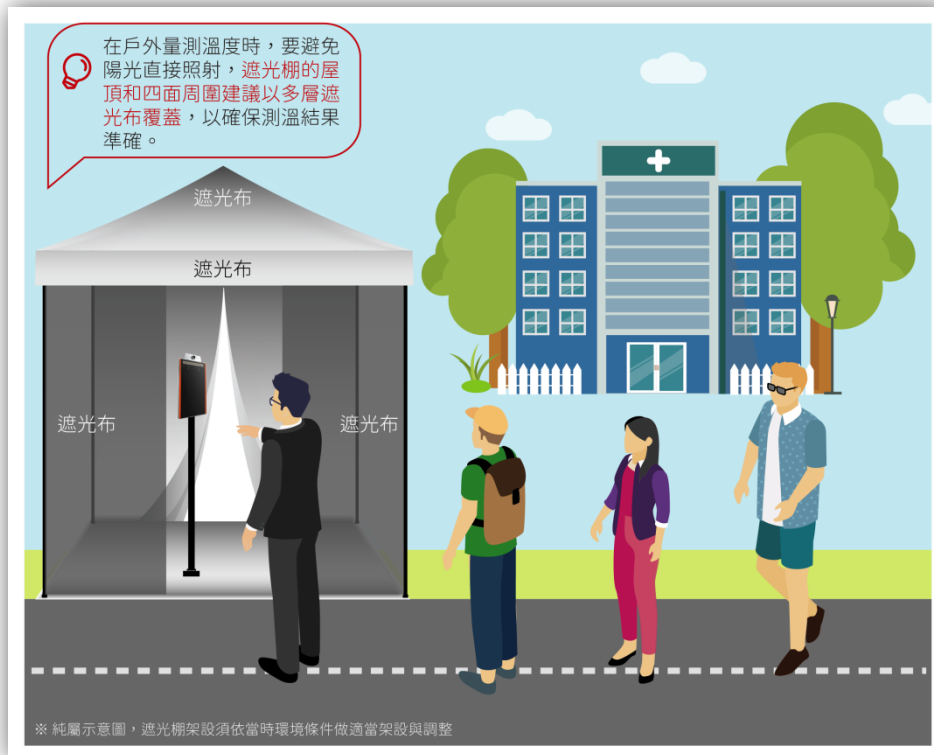

2. 環境溫度，需要控制在攝氏 15 ~ 33 度；太低或太高，量測出來的體溫已無法參考；請注意並控制環境溫度，才能得到正確體溫值。
3. 當人由室外進入室內，如果兩者溫度差距太大，需要延遲至少 5 分鐘，再進行體溫量測。例如，室外是攝氏 35 度，直接進入室內為攝氏 25 度的條件，如果立刻測量體溫，這個時候的體溫將是不正確的。
4. 本產品建議開機 5~10 分鐘後，再進行實際量測。
5. 本產品主要偵測人體額頭的溫度(額溫)，若量測人體的其他位置，量測值將不正確。
6. 想進一步瞭解產品，可關注我們的網站。

中文網站: <http://www.smartbridge-info.com>

英文網站: <http://www.smartbridge-tech.com>



製造商：睿橋資訊股份有限公司
地址：台灣新竹市民生路255號12樓
電話：+886-3-5424911
傳真：+886-3-5423760
產地：台灣製造
www.smartbridge-tech.com